



DISPOSABLE ELECTROCAUTERIES INFORMATION FOR SAFETY AND PERFORMANCES

INTENDED USE

- Cauterization of tissues and small blood vessels during surgical procedures
- Device is single use sterile, packaged, powered by built-in alkaline batteries

MODELS

TYOLOGY	TEMPERATURE	TIP
High Temperature Cautery - HTC	1200°C/2200°F	Thin tip
High Temperature Cautery - HTC	1200°C/2200°F	Large tip
High Temperature Cautery - HTC	1200°C/2200°F	Thin tip lenght 125mm
High Temperature Cautery - HTC	1200°C/2200°F	Thin tip lenght 75mm
Medium Temperature Cautery - MTC	800°C/1400°F	Rigid tip
Low Temperature Cautery - LTC	600°C/1100°F	Thin tip

CONTRAINDICATIONS

- Electrocauteries are not suitable for cauterizing heavy bleeding.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Product sterilized with Ethylene Oxide
- Disposable product, DO NOT REUSE – Reuse may result in:
 - Cross infections;
 - alterations of materials;
 - the loss of the initial functional characteristics of the product;
- Sterility is not guaranteed if the package has been opened and/or damaged
- Avoid prolonged steady on, it can cause excessive heating and possible breakage of the tip.
- Do not exert pressure that could deform and break the tip
- Avoid direct contact of liquids with the body of the electrocautery.



Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio
(Florence, Italy) - www.fiab.it



ELETTROCAUTERI MONOUSO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA E LE PRESTAZIONI

DESTINAZIONE D'USO

- Cauterizzazione di tessuti e piccoli vasi sanguigni durante le procedure chirurgiche
- Il dispositivo è monouso sterile, confezionato, alimentato da batterie alcaline integrate

MODELLI

TIPOLOGIA	TEMPERATURA	PUNTA
Cauterio ad alta temperatura - HTC	1200°C/2200°F	Punta sottile
Cauterio ad alta temperatura - HTC	1200°C/2200°F	Punta grande
Cauterio ad alta temperatura - HTC	1200°C/2200°F	Punta sottile lunghezza 125 mm
Cauterio ad alta temperatura - HTC	1200°C/2200°F	Punta sottile lunghezza 75 mm
Cauterio a media temperatura - MTC	800°C/1400°F	Punta rigido
Cauterio a bassa temperatura - LTC	600°C/1100°F	Punta sottile

CONTROINDICAZIONI

- Gli elettrocauteri non sono adatti per cauterizzare forti emorragie.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Prodotto sterilizzato con Ossido di Etilene
- Prodotto usa e getta, **NON RIUTILIZZARE** – Il riutilizzo può comportare:
 - Infezioni incrociate;
 - alterazioni dei materiali;
 - la perdita delle caratteristiche funzionali iniziali del prodotto;
- La sterilità non è garantita se la confezione è stata aperta e/o danneggiata
- Evitare l'accensione prolungata, può causare un riscaldamento eccessivo e la possibile rottura della punta.
- Non esercitare pressioni che potrebbero deformare e rompere la punta
- Evitare il contatto diretto di liquidi con il corpo dell'elettrocauterizzazione.



Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio
(Florence, Italy) - www.fiab.it